

## Instrucciones de uso (español [ES])

### Para colchonetas de quirófano antideslizantes de PrimePad



[www.PM-eifu.com](http://www.PM-eifu.com)

**Descripción:** PrimePad es una colchoneta antideslizante de posicionamiento que ofrece apoyo y menos presión para el paciente, con el fin de garantizar que permanece inmóvil durante la intervención médica. Estas colchonetas se hallan disponibles en distintos tamaños, formas y kits.

**Uso previsto:** las colchonetas antideslizantes PrimePad están diseñadas para que el paciente o alguna parte del cuerpo tengan apoyo y estabilización, en la posición deseada en la mesa de quirófano, durante una intervención médica. Algunos de los dispositivos están pensados para evitar que el paciente se deslice cuando esté en la posición de Trendelenburg o cuando se le aplique tracción.



#### Advertencias y precauciones:

- El dispositivo solo lo deben utilizar profesionales sanitarios autorizados.
- Siga siempre los protocolos de su centro para el posicionamiento del paciente y la frecuencia de la monitorización.
- No utilizar si el paquete está dañado.
- No se debe colocar ningún material entre el dispositivo y la mesa de quirófano.
- La exposición prolongada de la espuma de poliuretano a temperaturas superiores a 240 °F (115 °C) puede provocar la pérdida de componentes volátiles, por lo tanto, no exponga la espuma a temperaturas excesivamente altas.

#### Limitaciones y contraindicaciones:

- El dispositivo está contraindicado para usarlo con pacientes que puedan tener sensibilidad a la espuma de poliuretano.



#### Instrucciones:

1. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que el colchón de la mesa quirúrgica está limpio, seco y firmemente situado en la mesa.
2. Coloque la colchoneta sobre la mesa, de forma que los cortes para la zona perineal del colchón y de la colchoneta queden alineados. Asegúrese de que no haya nada entre el colchón de la mesa quirúrgica y la colchoneta PrimePad.
3. Posicione al paciente como sea necesario para la intervención. Es importante que el paciente tenga el máximo contacto con la colchoneta, por eficacia clínica. Reduzca al mínimo el ancho de la sábana entremetida o de arrastre, para que el contacto del paciente con la colchoneta sea máximo. Asegúrese de que el sacro, el torso y los hombros del paciente están en contacto directo con la colchoneta. Para el posicionamiento intraoperativo de la cabeza del paciente, la preferencia es que sea un rodillo pequeño de espuma o de gel. Si se emplea una almohada, asegúrese de que los hombros del paciente estén en contacto con la colchoneta y no con la almohada.
  - Solo para las colchonetas con correas para las barandillas de la mesa: las correas de la mesa deben quedar en la parte inferior de la colchoneta. Deslice las correas hacia abajo, entre la barandilla y la mesa. Vuelva a traerlas hacia arriba por el lado de la barandilla y fije la correa de nuevo firmemente sobre sí misma.
4. Deseche las colchonetas después de su uso.

**Contenido:** el producto se proporciona en condición no estéril y está pensado para su uso con un solo paciente. No volver a utilizar. El producto está fabricado con espuma de poliuretano flexible. El producto no contiene látex.

**Limpieza:** las colchonetas PrimePad no están aprobadas para ser usadas con limpiadores o desinfectantes químicos.

**Conservación:** cuando no se estén usando, conservar en un lugar fresco, seco y sin luz solar directa.

**Desecho:** las colchonetas se deben desechar de conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

**Aviso para el usuario y/o el paciente:** en caso de incidente adverso relacionado con el dispositivo, retírelo e informe del incidente al fabricante.

**Símbolos de la etiqueta:** los símbolos utilizados en la etiqueta o en la documentación del producto se definen en la Leyenda de símbolos en este hipervínculo: [www.PM-eifu.com/symbols](http://www.PM-eifu.com/symbols)



**Prime Medical, LLC**

1410 E. Weisgarber  
Knoxville, TN 37909 USA  
www.PrimeMedicalLLC.com  
+1 877-434-2021




**QNET B.V.**

P.O. Box 10110  
NL-5160 GA Oisterwijk  
Kantstraat 19,  
5076 NP Haaren  
The Netherlands  
EAR@ce-mark.com



**QNET LTD.**

Livingstone House  
309 Harrow Road  
Wembley, Middlesex  
HA9 6BD,  
United Kingdom  
UKRP@medical-risk.com

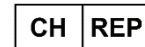

**QNET CH-REP GmbH**

Im Buel 15  
Postfach 1558  
8750 Glarus  
Switzerland  
CH-REP@medical-risk.com

**Estas instrucciones de uso corresponden a los siguientes números de modelo de PrimePad.**

**PrimePad-1:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-1S:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-2:** colchoneta antideslizante de 2" (5,08 cm) con corte para la zona perineal, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad-2S:** colchoneta antideslizante de 2" (5,08 cm) con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad-3:** colchoneta antideslizante en rampa de 1" a 2" (2,54 a 5,08 cm) con corte para la zona perineal, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm)

**PrimePad-3S:** colchoneta antideslizante en rampa de 1" a 2" (2,54 a 5,08 cm) con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm)

**PrimePad-W1:** colchoneta antideslizante con vuelta/protección para brazos integrado de 24"x24" (60,96 x 60,96 cm), corte para la zona perineal y correas para barandilla, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-W2:** colchoneta antideslizante con vuelta/protección para brazos integrado de 24"x16" (60,96 cm x 40,64 cm), corte para la zona perineal y correas para barandilla, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K1:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla y un solo juego de correas para el cuerpo, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K2:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, un solo juego de correas para el cuerpo y sábana de arrastre desechable, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K3:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, un solo juego de correas para el cuerpo y un par de mangas para protección de brazos 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K4:** colchoneta antideslizante con corte para zona perineal, posicionador para cabeza/hombros, un solo juego de correas para el cuerpo y un par de soportes para brazos, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K5:** colchoneta antideslizante de 2" (5,08 cm) con corte para zona perineal, posicionador para cabeza/hombros, un solo juego de correas para el cuerpo y un par de mangas para protección de brazos, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad-K6:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, un solo juego de correas para el cuerpo, sábana de arrastre desechable y un par de mangas para protección de brazos 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K7:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, un solo juego de correas para el cuerpo, sábana de arrastre desechable, un par de mangas para protección de brazos y soporte para cabeza, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K8:** colchoneta antideslizante con vuelta/protección para brazos integrado de 24"x16" (60,96 cm x 40,64 cm), corte para la zona perineal, correas para barandilla, un solo juego de correas para el cuerpo, sábana de arrastre desechable y soporte para cabeza 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K9:** colchoneta antideslizante con corte para la zona perineal, con correas para barandilla y sábana de arrastre desechable, 44"x23"x1" (111,76 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-K10:** colchoneta antideslizante de 2" (5,08 cm) con corte para la zona perineal, con correas para barandilla, un solo juego de correas para el cuerpo y sábana de arrastre desechable, 44"x23"x2" (111,76 cm x 58,42 cm x 5,08 cm).

**PrimePad-PED:** colchoneta antideslizante pediátrica, 24"x20"x1" (60,96 cm x 50,80 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-SQ1:** espuma cuadrada para posicionamiento, 12"x12"x1" (30,48 cm x 30,48 cm x 2,54 cm).

**PrimePad-SQ2:** espuma cuadrada de 2" (5,08 cm) para posicionamiento, 12"x12"x2" (30,48 cm x 30,48 cm x 5,08 cm).

**PrimePad-BBO:** funda para puf, 40"x38"x1" (101,60 cm x 96,52 cm x 2,54 cm)

**PrimePad-CVP:** colchoneta cardiovascular, 72"x23"x1" (182,88 cm x 58,42 cm x 2,54 cm).